

1. Kurzanleitung zur Montage der STEETS Abstellhilfe



qrco.de/bexSbv

Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um das Montagevideo für die STEETS Abstellhilfe aufzurufen.


1. Messen Sie mit der beiliegenden Schablone den Durchmesser des unteren und oberen Rohrs Ihrer Gehstütze. Vergleichen Sie Ihre Messungen mit der Abbildung, um zu bestimmen, ob Ihre Gehstütze eine der beiliegenden Adapterhülsen benötigt.

2. Setzen Sie die gegebenenfalls benötigten Adapterhülsen in das untere und obere Teilsystem der STEETS Abstellhilfe ein.

Messung unten		Messung oben
Zu breit / nicht kompatibel	1 24 mm	Keine Adapterhülse oben notwendig
Keine Adapterhülse unten notwendig	2 22 mm	Keine Adapterhülse oben notwendig
Adapterhülse mit drei Punkten unten nutzen	3 20 mm	Adapterhülse mit einem Punkt oben nutzen
Adapterhülse mit zwei Punkten unten nutzen	4 17 mm	Adapterhülse mit einem Punkt oben nutzen



3. Entfernen Sie den Gummifuß von dem Rohr Ihrer Gehstütze **oder** ziehen Sie alternativ die beiden Röhre auseinander.

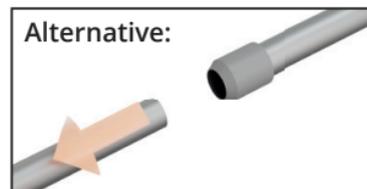

4. Schieben Sie das untere Teilsystem auf das untere Rohr der Gehstütze und klicken Sie das obere Teilsystem am oberen Rohrende fest. Anschließend platzieren Sie wieder den Gummifuß auf dem Rohr der Gehstütze **oder** stecken die Röhre zusammen. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die drei Schrauben anzuziehen und die STEETS Abstellhilfe am niedrigsten und höchsten Punkt des Gehstützenrohrs zu befestigen.



Hinweis: Überprüfen Sie, ob der Drehverschluss am Griff der STEETS Abstellhilfe geöffnet ist, denn nur so kann das obere Teilsystem nach oben gezogen werden.

5. Stellen Sie sicher, dass die Beine der STEETS Abstellhilfe **ausgeklappt** sind und der Drehverschluss **geöffnet** ist. Positionieren Sie den Griff der Abstellhilfe etwa eine Daumenbreite entfernt vom Griff der Gehstütze. Schließen Sie dann den Drehverschluss am Griff der Abstellhilfe.

